

# MASKEN- DESINFIZATIONSMITTEL



## MASKEN- DESINFIZATIONS- MITTEL

Konzentrat

### WIRKSAME BESTANDTEILE:

Benzyl-C12-16-alkyldimethyl-, Chloride  
Linalylacetat  
Citral

**INHALT:** 250 ml

## MASKEN- DESINFIZATIONSMITTEL

**Desinfektionshinweise für  
Atemschutzgeräte und Flächen**

Konzentrat

### EIGENSCHAFTEN:

Formaldehydfrei. Gut materialverträglich. Bakterizid  
inkl. Tb., fungizid, begrenzt viruzid (HIW/HBV).

### ANWENDUNGSEMPFEHLUNG:

Zur Flächendesinfektion gem. Prüfmethode der DGHM (Konzentration – Einwirkzeit):  
1,0% – 120 Min.; 2,0% – 60 Min. Zur Desinfektion von Atemschutzgeräten: 2,0% –  
60 Min. Nur für den professionellen Gebrauch.

**ACHTUNG:** Die Verdünnung des Desinfektionsmittels darf 5% nicht übersteigen.

### ENTSORGUNG:

Produktreste im Originalgebinde als Sonderabfall entsorgen, nichts ins Abwasser  
gelangen lassen. Leere Behälter mit Wasser ausspülen und das Spülwasser zum  
Ansetzen der Gebrauchslösung verwenden. Nach dem Reinigen können die Materialien  
der Kunststoffwiederverwertung zugeführt werden.

### ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN:

Dem behandelnden Arzt das Sicherheitsdatenblatt oder dieses Etikett vorzeigen.  
Nach Einatmen an die frische Luft gehen. Nach Hautkontakt sofort mit Seife und viel  
Wasser abwaschen. Beschmutzte Kleidung und Schuhe sofort ausziehen.  
Nach Augenkontakt sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen,  
auch unter den Augenlidern. Arzt aufsuchen. Nach Verschlucken Mund ausspülen.  
Kein Erbrechen herbeiführen. Arzt aufsuchen.

# MASKEN- DESINFIZATIONSMITTEL

### HINWEISE FÜR DAS KONZENTRAT:

P102 Darf nicht in die Hände von  
Kindern gelangen.  
P273 Freisetzung in die Umwelt  
vermeiden.

P280 Bei der Arbeit geeignete  
Schutzhandschuhe und Schutzbrille/  
Gesichtsschutz tragen. Hautkontakt  
verursacht eine mit der Zeit wieder  
verschwindende Gelbfärbung der  
Haut (normalerweise in weniger als  
einer Woche).

P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT  
DER HAUT: Mit viel Wasser und  
Seife waschen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT  
DEN AUGEN: Einige Minuten lang  
behutsam mit Wasser spülen.  
Vorhandene Kontaktlinsen nach  
Möglichkeit entfernen. Weiter  
spülen.

GHS in der EU:  
Einstufung und Kennzeichnung  
gemäß Verordnung (EG)  
Nr. 1272/2008 (CLP-VO)

Made in Germany



4 013207 266946

11-02.19

[www.ekastu.de](http://www.ekastu.de)  
[info@ekastu.de](mailto:info@ekastu.de)



**EKASTU Safety** Best.-Nr. 266 942



X714008

[www.ekastu.li](http://www.ekastu.li)  
[info@ekastu.li](mailto:info@ekastu.li)